

АККУ-ЧЕК® Софтклікс

Roche



Акку-Чек® Софтклікс –
зручний пристрій для плавного
і швидкого проколювання.



Перед використання ознайомтесь з Керівництвом Користувача і проконсультуйтеся з лікуючим лікарем.
Інформація призначена для медичних та фармацевтичних працівників.

АККУ-ЧЕК®

Зручний у використанні



Легко навчитись



Зніміть ковпачок.



Встановіть ланцет в фіксатор до клацання.



Видаліть захисний ковпачок обертальним рухом.




Закрийте пристрій ковпачком.



Оберіть 1 з 11 рівнів глибини проколу.



Натисніть на кнопку «взведення».


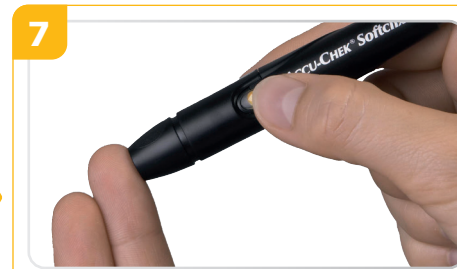


Щільно притисніть пристрій до обраної ділянки на пальці і натисніть кнопку «пуск».





Зніміть ковпачок. Видаліть використаний ланцет за допомогою виймача.

Плавне і швидке проколювання

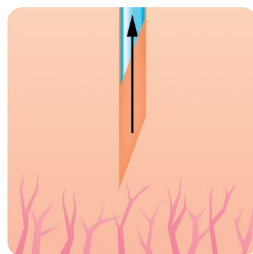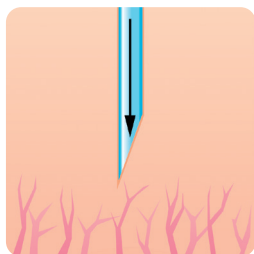


Технологія Кліксмоушин

- ▶ Швидке проколювання без вібрації
- ▶ Ланцет зупиняється плавно, з швидким поверненням назад

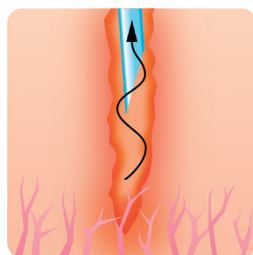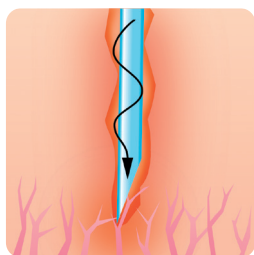

Традиційна технологія

- ▶ Вібрація призводить до болючої травми тканин
- ▶ Ланцет різко зупиняється і повертається вібруючи

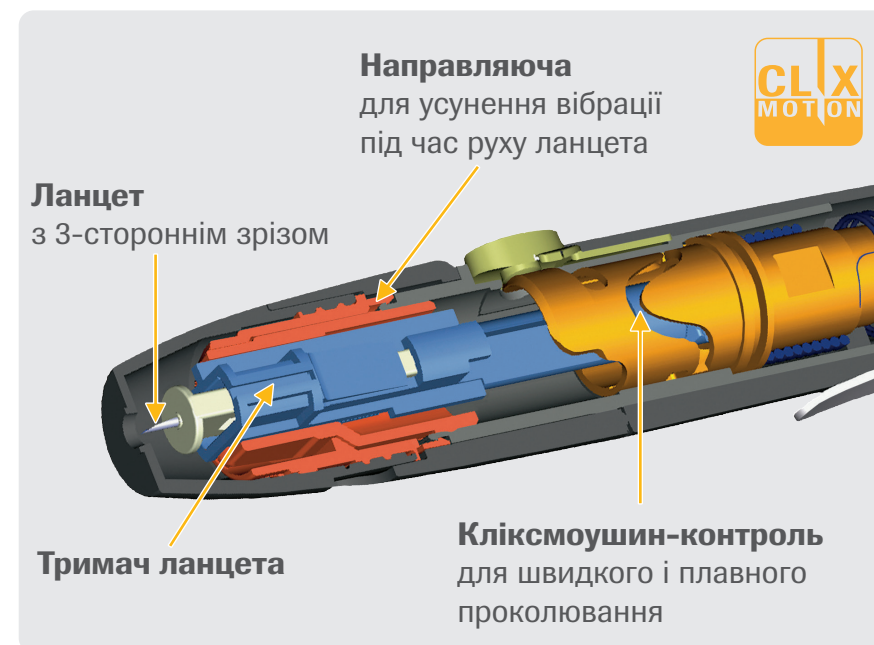

- ▶ Особливий зріз ланцетів Акку-Чек® Софтклікс в поєднанні з технологією Кліксмоушин забезпечує плавне і швидке проколювання.

АККУ-ЧЕК®

Плавне і швидке проколювання

Ланцети Акку-Чек® Софтклікс

- 3-сторонній зріз ланцета під оптимальним кутом
- Гладка полірована поверхня, призначена для зменшення тертя під час проколювання
- Прокол триває лише декілька мілісекунд



Використання пристрою Акку-Чек® Софтклікс разом з ланцетами Акку-Чек® Софтклікс робить проколювання плавним і швидким, що допомагає звести до мінімуму ушкодження шкіри і нервових тканин.

Компактний і зручний



АККУ-ЧЕК®

5 порад для отримання краплі крові



Мийте і витирайте руки **насухо**.



Робіть проколювання на **бічній поверхні пальця**.



Щільно притискайте до шкіри пристрій для проколювання.



Обирайте глибину проколу, достатню для отримання краплі крові.



Щоденно змінюйте пальці і забезпечуйте **хорошу циркуляцію крові**.



АККУ-ЧЕК®

АККУ-ЧЕК® Софтклікс

Roche



**БЕЗСТРОКОВА ГАРАНТІЯ
ТА**



БЕЗКОШТОВНИЙ СЕРВІС¹



**ГАРЯЧА ЛІНІЯ²
0 800 300 540**



**ЧАТ-БОТ²
сервіс підтримки 24/7**



**НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО
accu-chek.com.ua**



**ЗНАЙТИ В АПТЕКАХ
tabletki.ua**



Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com.ua

«Рош Діабетес Кеа ГмбХ»,
Зандгофер Штрассе 116
68305, Мангайм, Німеччина

ТОВ «Рош Україна»,
Україна, 003150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 139, 5 поверх.
E-mail: ukraine.accu-chek@roche.com



Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Діалог Діагностика»,
Україна, 04205, м. Київ, проспект Оболонський 32.
Телефон гарячої лінії 0 800 300 540.
E-mail: info@dialogd.com

¹ Крім випадків, зазначених у Керівництві Користувача.

² Обслуговується ТОВ «Діалог Діагностика».

Перед використанням ознайомтесь з Керівництвом Користувача і проконсультуйтеся з лікуючим лікарем.
Інформація призначена для медичних та фармацевтичних працівників.

АККУ-ЧЕК®